

# Лучший выбор для процедур TVT



**КОНЧИК ИГЛЫ**  
Дизайн, облегчающий прохождение проводника.

**ДИАМЕТР ИГЛЫ**  
3,6 мм обеспечивает контролируемое и безопасное прохождение через позадилоное пространство.



**ЗЕЛЕННЫЕ РУКАВА-КОННЕКТОРЫ**  
Обеспечивают четкую визуализацию во время цистоскопии.

## Движение рукоятки в ТРИ ШАГА

### Основные ПОЗИЦИИ рукоятки



# Позадилонная слигновая система премиум-класса для лечения стрессового недержания мочи

Разработана для проведения хирургии более безопасной процедуры



**ПОЗИЦИОННЫЙ ЯРЛЫК**  
Обеспечивает контролируемую и легкую установку сетки.

**ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ СЕТКА ТИПА I**  
С низкой эластичностью. Термообработанные края обеспечивают лучшую поддержку.

**ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА**  
Минимизирует трение и повреждение тканей при установке.

**ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН РУКОЯТКИ**  
Обеспечивает точное, контролируемое движение руки.

**ПОЗИЦИОННЫЕ МЕТКИ**  
Указывают на положение кончика иглы во время установки.



СРАВНЕНИЕ ПОЗАДИЛОННЫХ СЛИНГОВЫХ СИСТЕМ

Особенности	Система GYNECARE TVT EXACT <sup>1</sup>	Система ADVANTAGE FIT <sup>2</sup>	Слингловая система STEEMA RETROPUBIC <sup>3</sup>	Ключевые моменты
Радиус иглы	106.5 mm	82.5 mm	106.2 mm	Разработана для обхода лобковой кости для снижения риска травм.
Цвет рукавов-коннекторов	Белый	Синий	Зеленый	Гарантия четкой визуализации при цистоскопии.
Позиционный ярлык	НЕТ	ДА	ДА	Обеспечивает контроль и легкое позиционирование сетки.
Усилие при установке <sup>4</sup>	15.8 N	17.3 N	12.1 N	Обеспечивает плавный проход при установке сетки.
Индекс эластичности <sup>5</sup>	3.7 mm/N	11.1 mm/N	2.9 mm/N	Высокая устойчивость к деформации, предотвращающая возможное повреждение уретры.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОЗАДИЛОННАЯ СЛИНГ-СИСТЕМА STEEMA

КОД ПРОДУКТА: **KIT-STEEMA-VS**

1 ИГЛА С РУКОЯТКОЙ

1 СЛИНГ STEEMA

1 <http://www.ethicon.com/healthcare-professionals/products/uterine-pelvic/incontinence-slings/gynecare-tvt-exact-continencesystem#!description-and-specs>.

2. Information published by Boston Scientific: Ref.: WH-64918-AB FEB/2015

3. Data on file. Promedon sling design properties.

4. Data on file. Bench test sample size n=15. Results from these studies may not be predictive of results in other cases.

5. Data on file. Bench test. Results from these studies may not be predictive of results in other cases.



B-30-85(01)/18-MARCH-2021



[www.promedon-urologypf.com/steema](http://www.promedon-urologypf.com/steema)

**Promedon**  
Urology and Pelvic Floor

STEEMA  
RETROPUBIC SLING SYSTEM

Эргономичный  
дизайн иглы

Простота  
установки

Низкая  
эластичность



ПОЗАДИЛОННАЯ СЛИНГОВАЯ СИСТЕМА  
ПРЕМИУМ-КЛАССА  
для лечения стрессового недержания мочи  
у женщин